

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ООО «ВИТАФОН» 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23
Телефоны: (812) 783-3602, 747-2648

e-mail:<info@vitafon.ru>

www.vitafon.ru

www.vsegdazdorov.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая комбинированная изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____	Дата продажи _____
	Штамп предприятия торговли
Штамп ОТК	
	Подпись

В. 11-014
Т. 11-014 (С)

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ «КОМБИНИРОВАННАЯ» (УРОЛОГИЧЕСКАЯ)

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации на теле виброфонов аппаратов серии «Витафон». Манжета одевается на тело под одежду или поверх одежды из тонких тканей.

В комплект поставки входят:

- Манжета фиксирующая 1 шт.**
- Руководство по эксплуатации 1 шт.**
- Потребительская тара с цветным вкладышем 1 шт.**


Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Манжета состоит из трех фиксирующих частей, которые перемещаются по эластичным ремням. Фиксирующие части имеют кармашки для виброфонов.

Для использования манжеты следует:

1. В соответствии с выбранными областями воздействия вложить виброфоны в кармашки, указанные на рисунке.
2. Надеть манжету и переместить фиксирующие части по ремням так, чтобы виброфоны оказались над выбранными областями.

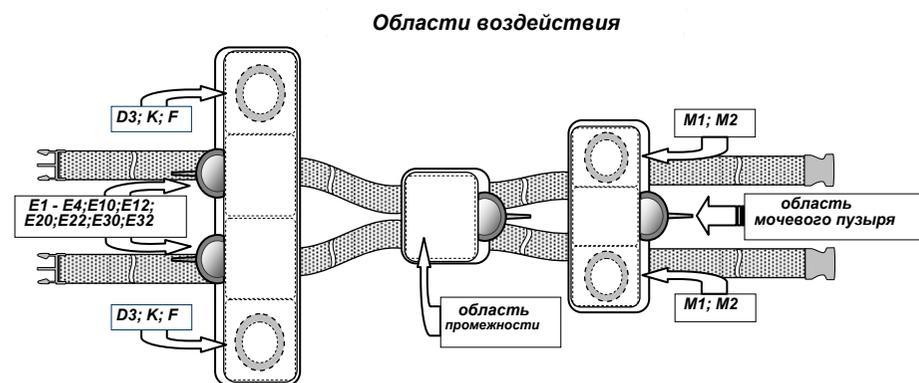

Возможные другие варианты соединения фиксирующих частей и ремней для удобства пользования:



Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**