

# Бандаж поддерживающий для беременных W-431

(для фиксации органов малого таза  
в физиологичном положении)

**B.Well**<sup>®</sup>  
rehab

Серия CARE

Бандаж для беременных, арт. W-431, поддерживает живот, компенсирует смещение центра тяжести у беременных и снижает нагрузку на позвоночник.

- ▶ рекомендуется ношение во 2-ом и 3-ем триместре
- ▶ при болях в позвоночнике
- ▶ предупреждает излишнее растяжение мышц и кожи живота (появление «растяжек»)

Анатомичный дизайн и система фиксирующих ремней позволяет регулировать степень компрессии поясничного отдела и не оказывать фиксирующего воздействия на живот. Бандаж незаметен под обычной одеждой, выполнен из гипоаллергенного воздухопроницаемого материала.

## Размер бандажа подбирается по окружности тела под животом

Для удобства подбора специалисты B.Well разработали таблицу соответствий размеров для бандажа на основании статистических данных:

Размер бандажа	Размер	Окружность тела под животом
S	до 44	до 85 см
M	46-48	85-98 см
L	48-50	98-105 см
XL	50-52	105-115 см
XXL	52-54	115-126 см



## Порядок надевания:

Живот должен располагаться над анатомическим вырезом. Дополнительные фиксирующие ремни позволяют регулировать степень компрессии в течение всего срока беременности.

## Режим ношения:

Профилактический, в течение дня, если иное не предписано врачом.

При подборе рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.

## Показания:

- ▶ уменьшает боли в спине
- ▶ способствует нормализации положения плода, снижает давление на органы малого таза
- ▶ поддерживает живот во 2-ом, 3-ем триместре
- ▶ снижает риск осложнений, в т. ч. гипертонуса матки, на фоне беременности
- ▶ предупреждает излишнее растяжение мышц и кожи живота (появление «растяжек»)
- ▶ сокращает сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов

**Комплектность:** бандаж

**Материал:** 77% полиэстер, 12% эластик, 11% спандекс

**Срок эксплуатации:** 2 года

**Гарантийный срок:** 6 месяцев

**Противопоказания:** не выявлены

**Предупреждения:** перед применением необходима консультация врача при наличии заболеваний кожи или аллергии на компоненты, находящиеся в составе бандажа.

## Правила ухода:

- ▶ Стирать вручную
- ▶ Температура не выше 30°C
- ▶ Не использовать машинную стирку, химически активных добавок
- ▶ Избегайте при сушке высоких температур (прямых солнечных лучей и нагревательных приборов)

